

Confection de la matière de rembourrage

Les orthèses en résine coulée sont rembourrées de l'intérieur. La peau est ainsi logée confortablement et ne se trouve pas en contact direct avec la coque dure de l'orthèse. De même, il est important que le rembourrage soit facile à nettoyer et qu'il puisse être remplacé.

Utilisez comme modèle pour confectionner la matière de rembourrage le gabarit de rembourrage qui a déjà été mis en place sur le positif plâtré lors du [modelage](#). Le gabarit de rembourrage conserve sa forme pendant la découpe non guidée des pièces de stratifié, car il est découpé en même temps.

Nous utilisons dans le présent tutoriel le gabarit de rembourrage de notre gamme de produits ainsi que la [matière de rembourrage tissu éponge xDRY](#).

Étape 1/5



Utilisez le gabarit de rembourrage pour découper un rembourrage auto-agrippant pour l'orthèse. La matière de rembourrage tissu éponge xDry, par exemple, peut être utilisée comme rembourrage auto-agrippant.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM




Découpez la matière de rembourrage. Si vous utilisez la matière de rembourrage tissu éponge xDry, veillez à ce que le revêtement en velours d'un côté serve à accrocher les points d'accrochage, tandis que le revêtement en tissu éponge doux pour la peau doit être placé contre la jambe du patient.

Remarque : en coupant avec des ciseaux cranteurs, on obtient un bord ferme qui n'a pas besoin d'être surfilé.



Vérifier la découpe du rembourrage.

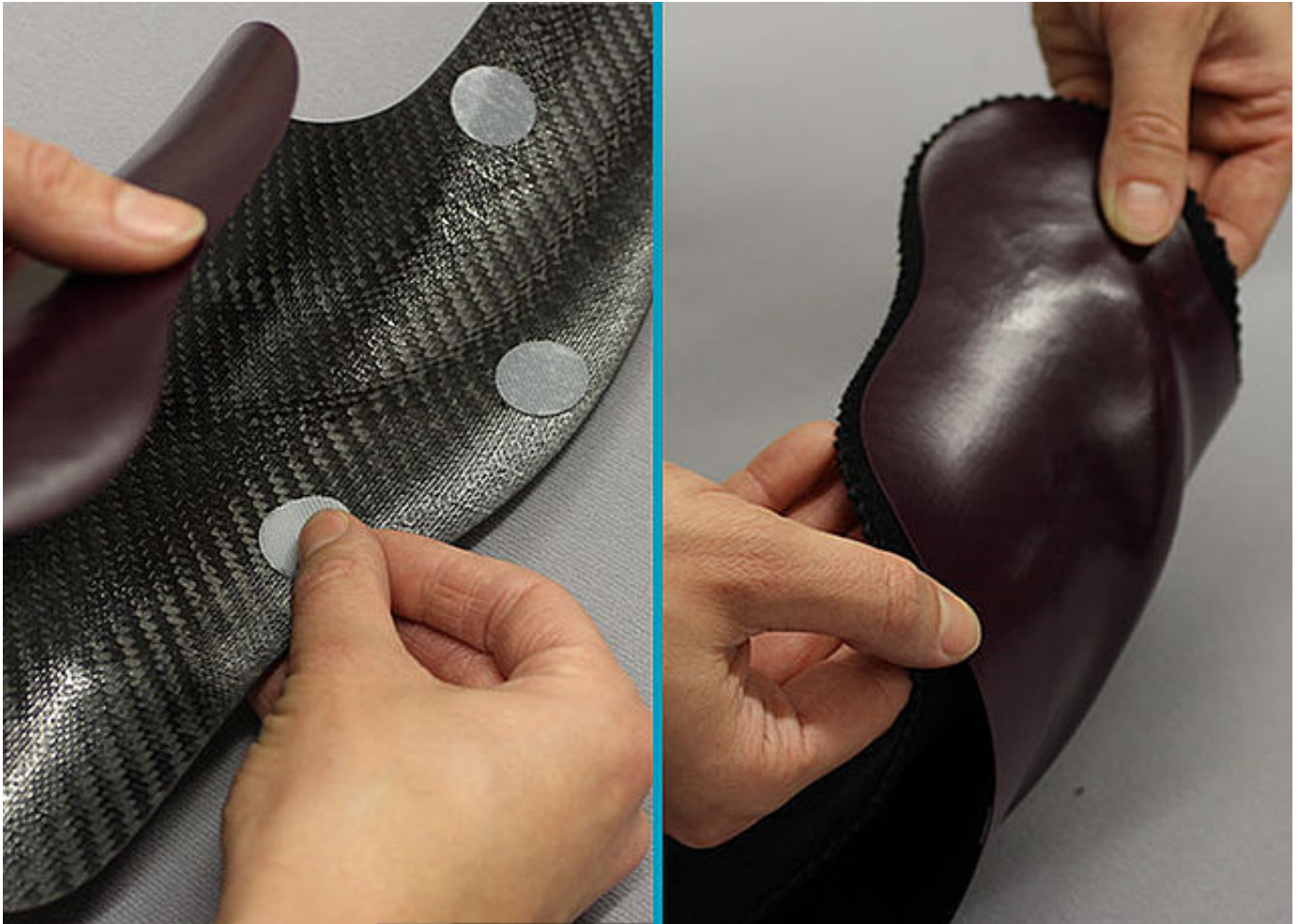

Collez les points d'accrochage à des endroits appropriés dans les coques de l'orthèse. Fixez le rembourrage.



La matière de rembourrage tissu éponge xDry est lavable à 60 °C. Pour des raisons d'hygiène, nous préconisons de fabriquer au moins un rembourrage interchangeable afin que le patient dispose toujours d'un rembourrage propre.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.com

