
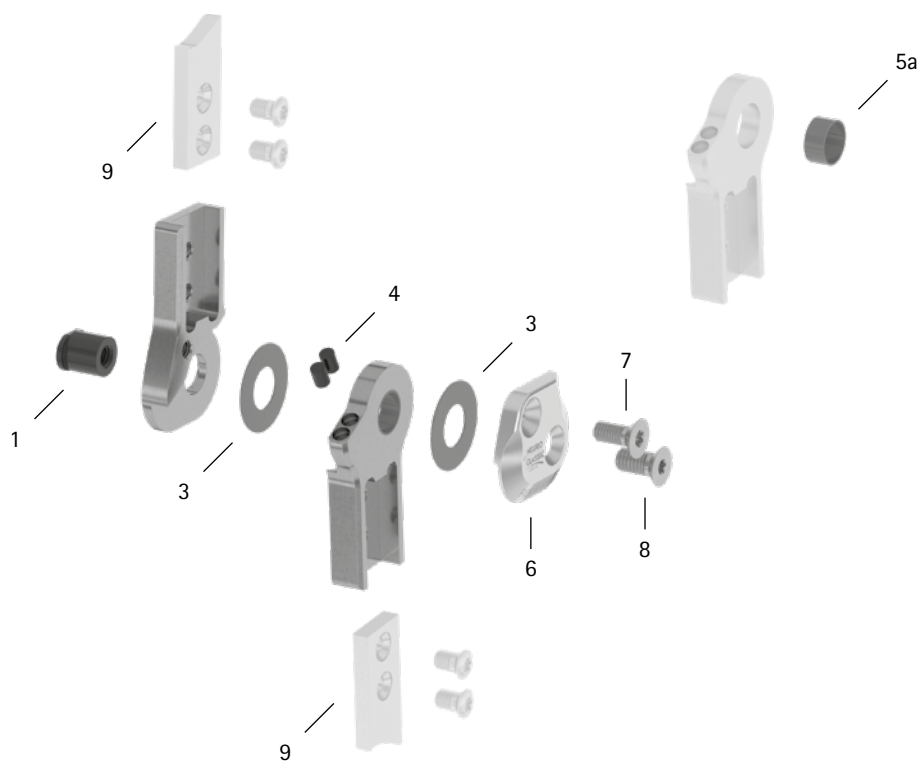


Commission des patients/ID de configuration _____

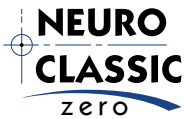

Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB9669-L0840	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS1910-040	rondelle de friction, Ø = 19 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS1910-045					
3	GS1910-050					
3	GS1910-055					
3	GS1910-060					
4	PN1000-L05/5	amortisseur de la butée d'extension	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5a	BP1110-L050	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SJ0152-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SJ0152-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium				
7	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Ancres modulaires et montants modulaires						
9	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

WP0074-FR-2024-04