



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB1069-L1220	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2611-040	rondelle de friction, Ø = 26 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2611-045					
3	GS2611-050					
3	GS2611-055					
3	GS2611-060					
4	PN1000-L05/5	amortisseur de la butée d'extension	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5a	BP1211-L060	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SL0155-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SL0155-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Ancre modulaires et montants modulaires						
9	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient