



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB6044-L0820	boulon à goupille fendue (cliquet de verrouillage)	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2	SB9664-L0820	boulon à goupille fendue (axe d'articulation)				
4	FE1414-02	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SK9605-E005	butée d'extension de 5°	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
7a	SK9605-E010	butée d'extension de 10°				
7b	SK9605-E020	butée d'extension de 20°				
7c	SK9605-E030	butée d'extension de 30°				

Commission des patients/ID de configuration \_\_\_\_\_

Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
9	SK0475-TI050	cliquet de verrouillage	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SK0475-TI063					
9	SK0475-TI075					
9	SK0475-TI088					
9	SK0475-TI100					
10	GS2210-040	rondelle de friction, Ø = 22 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	GS2210-045					
10	GS2210-050					
10	GS2210-055					
10	GS2210-060					
11a	BP1110-L040	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
12	SK0455-2L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
12	SK0455-2R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium				
13	SC1404-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
14	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
<b>Câble traction (si disponible). Il vous faut, pour monter un câble de traction sur le levier de blocage, un adaptateur pour câble de traction par levier de blocage.</b>						
15	ZS1000-L400	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 400 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
15	ZS1000-L500	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 500 mm				
15	ZS1000-L600	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 600 mm				
15	ZS1000-L700	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 700 mm				
15	ZS1100-L400	câble de traction, séparable par raccord, 400 mm				
15	ZS1100-L500	câble de traction, séparable par raccord, 500 mm				
<b>Ancres modulaires et montants modulaires</b>						
16	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient