


Commission des patients/ID de configuration \_\_\_\_\_

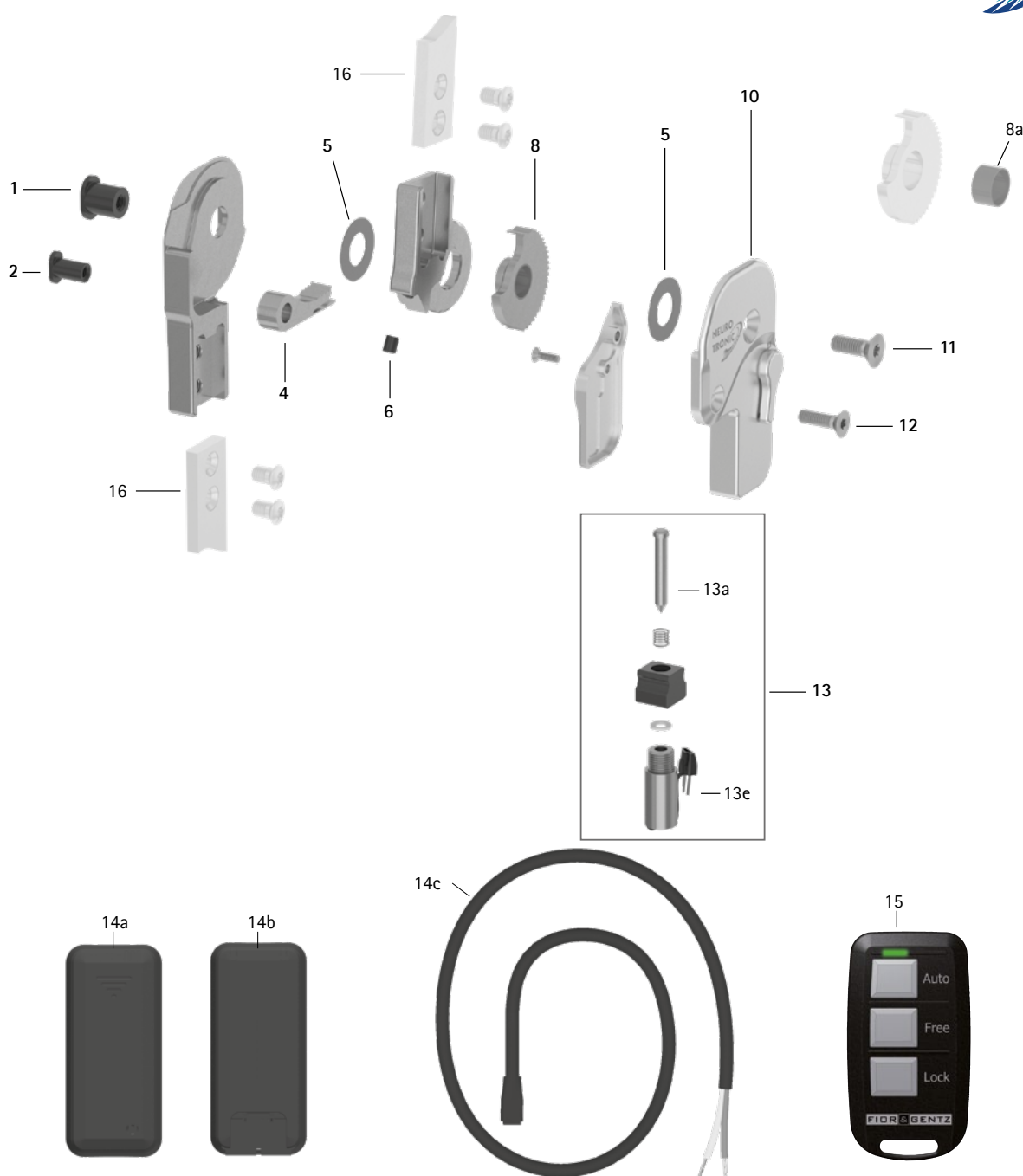

Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB1069-L1000	boulon à goupille fendue (axe d'articulation)	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2	SB8559-L1000	boulon à goupille fendue (cliquet de verrouillage)				
4	SK0375-2	cliquet de verrouillage	usure des dents	remplacer	tous les 3 mois	12 mois pour un niveau d'activité de 1 et 2 9 mois pour un niveau d'activité de 3 6 mois pour un niveau d'activité de 4

WP0113-FR-2021-12

Commission des patients/ID de configuration \_\_\_\_\_

Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
5	GS2411-040	rondelle de friction, Ø = 24 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5	GS2411-045					
5	GS2411-050					
5	GS2411-055					
5	GS2411-060					
6	PN1000-L06	amortisseur de la butée d'extension	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8	SK0365-2L	couronne avec douille de guidage, latérale gauche ou médiale droite, titane	usure des dents	remplacer	tous les 3 mois	12 mois pour un niveau d'activité de 1 et 2
8	SK0365-2R	couronne avec douille de guidage, médiale gauche ou latérale droite, titane				9 mois pour un niveau d'activité de 3
8a	BP1211-L059	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	SK3895- L	plaque supérieure avec levier, latérale gauche ou médiale droite	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
10	SK3895- R	plaque supérieure avec levier, médiale gauche ou latérale droite				
11	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
12	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
13a	SK0385-01	piston pour aimant de levage	encrassement	nettoyer	tous les 6 mois	-
13e	SK0385-00	aimant de levage sans piston, avec connecteur	encrassement	nettoyer	tous les 3 mois	-
14a	ET3830	contrôleur sans Bluetooth avec des batteries interchangeables	logiciel obsolète	actualiser le logiciel	tous les 6 mois	36 mois
14a	ET3845	contrôleur avec Bluetooth avec des batteries interchangeables				
14b	ET3840	contrôleur avec Bluetooth avec une batterie lithium-polymère	mauvais état de la batterie	remplacer le contrôleur		
14c	ET0420-5	câble de raccordement pour l'aimant de levage, bouts étamés, 360 mm	détérioration	remplacer	tous les 6 mois	-
sans ill.	ET0420-4	câble de raccordement pour ensemble levage, 550 mm				
<b>Télécommande</b>						
15	ET3800-P	télécommande pour le patient pour contrôleurs avec des batteries interchangeables, 1 jambe	logiciel obsolète	actualiser le logiciel	tous les 6 mois	36 mois
15	ET3840-P	télécommande pour le patient pour contrôleurs avec batterie lithium-polymère rechargeable, 1 jambe				
<b>Ancre modulaires et montants modulaires</b>						
16	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-