



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB1069-L1060	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2311-040	rondelle de friction, Ø = 23 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	VE3771-012/26	amortisseur à joint torique	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5a	BP1211-L055	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SL0263-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SL0263-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	VE3771-08/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	PN0005-L02	amortisseur de butée**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11	SL0283-05	butée d'extension**	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
12	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
13	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-13	SL2933-L	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6-13	SL2933-R	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
14	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément