


Commission des patients/ID de configuration _____

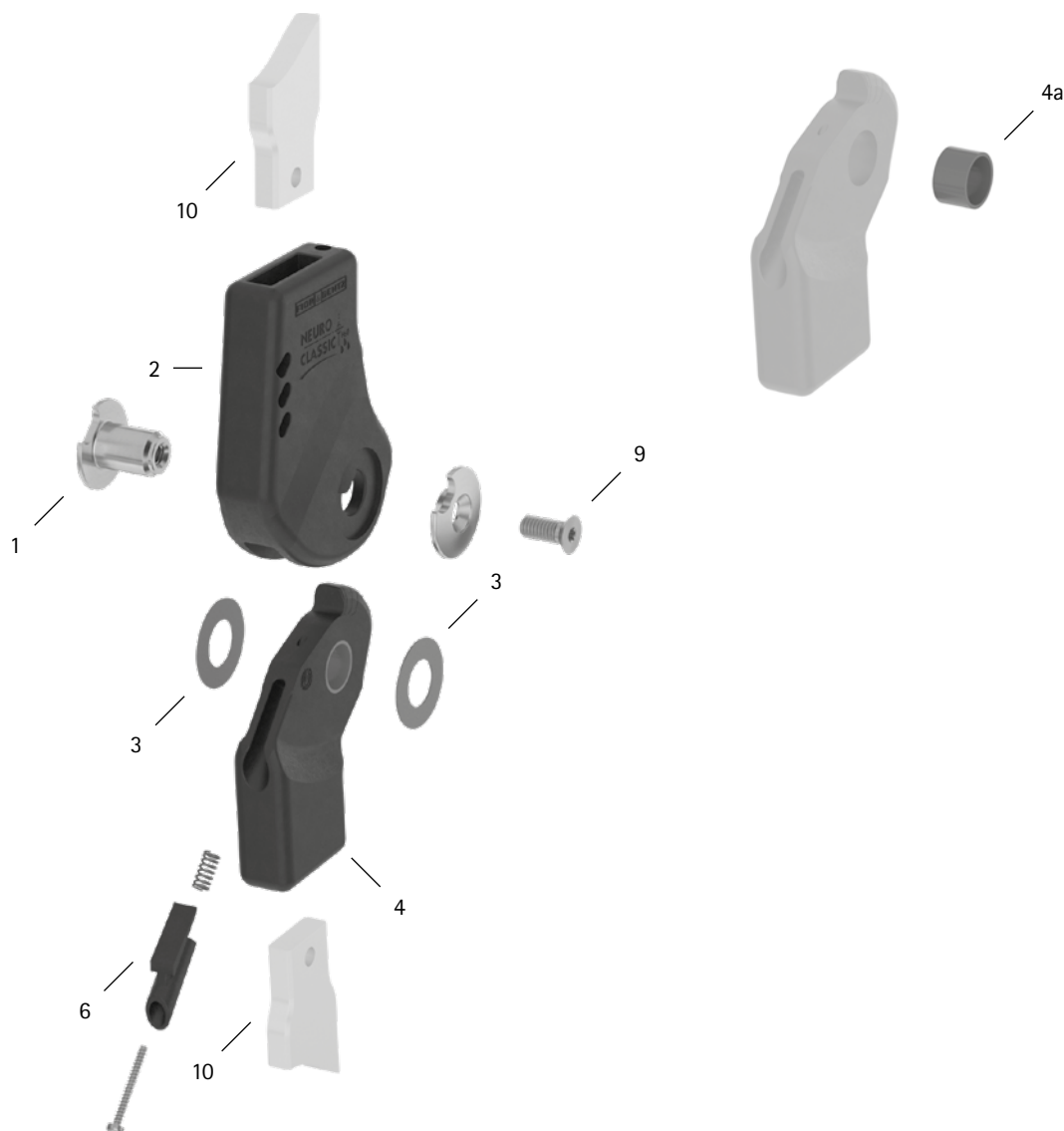

Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SK0892-1/C	boulon à goupille fendue	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
2	SL0102-C	partie supérieure, droite, carbone	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
3	GS2009-040	rondelle de friction, Ø = 20 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2009-045					
3	GS2009-050					
3	GS2009-055					
3	GS2009-060					
4	SK0812-2/C	partie inférieure de 5° avec douille de guidage, droite, hybride carbone-titane	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
4a	BP1009-L059	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SK9802-E005/C	butée d'extension de 5°	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
9	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Ancres modulaires et montants modulaires						
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

WP0121-FR-2025-09