


Commission des patients/ID de configuration _____

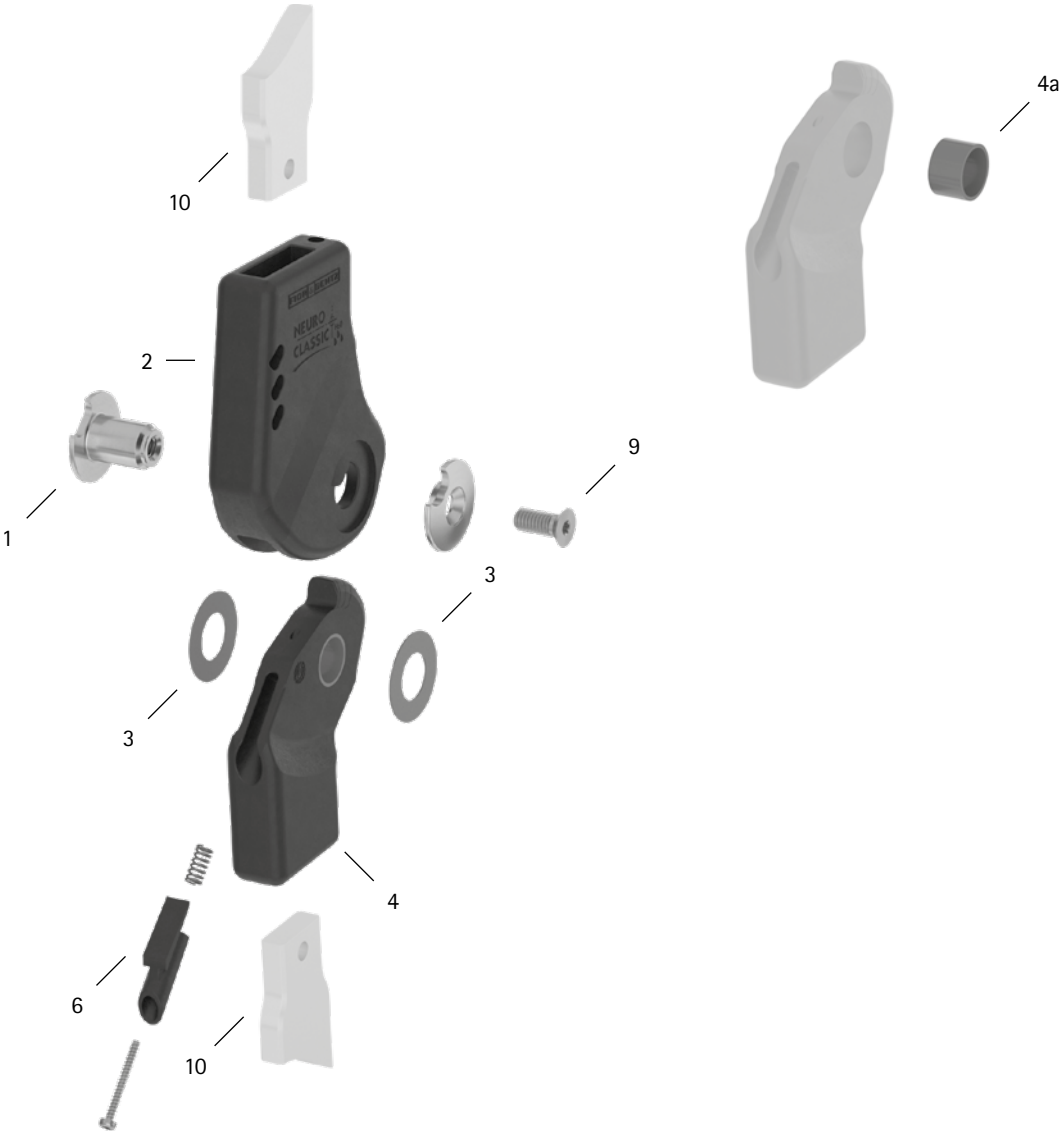

Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SK0893-1/C	boulon à goupille fendue	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
2	SL0103-C	partie supérieure, droite, carbone	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
3	GS2311-040	rondelle de friction, Ø = 23 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	SK0813-2/C	partie inférieure de 5° avec douille de guidage, droite, hybride carbone-titane	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
4a	BP1211-L077	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SK9803-E005/C	butée d'extension de 5°	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
9	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Ancres modulaires et montants modulaires						
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient