



Pos.	10 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB6034-L0490	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2a	SC9604-L06ST	vis de réglage	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	GS4007	goupille de sécurité	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
4	GS1206-040	rondelle de friction, Ø = 12 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1206-045					
4	GS1206-050					
4	GS1206-055					
4	GS1206-060					
5	SF0260-AL	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
<b>Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires</b>						
8	BP0706-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancrages modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient