



Pos.	12 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB7049-L0590	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2a	SC9604-L06ST	vis de réglage	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	GS4007	goupille de sécurité	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
4	GS1407-040	rondelle de friction, Ø = 14 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1407-045					
4	GS1407-050					
4	GS1407-055					
4	GS1407-060					
5	SF0261-AL	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SC1404-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1404-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
8	BR0807-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancrages modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient