


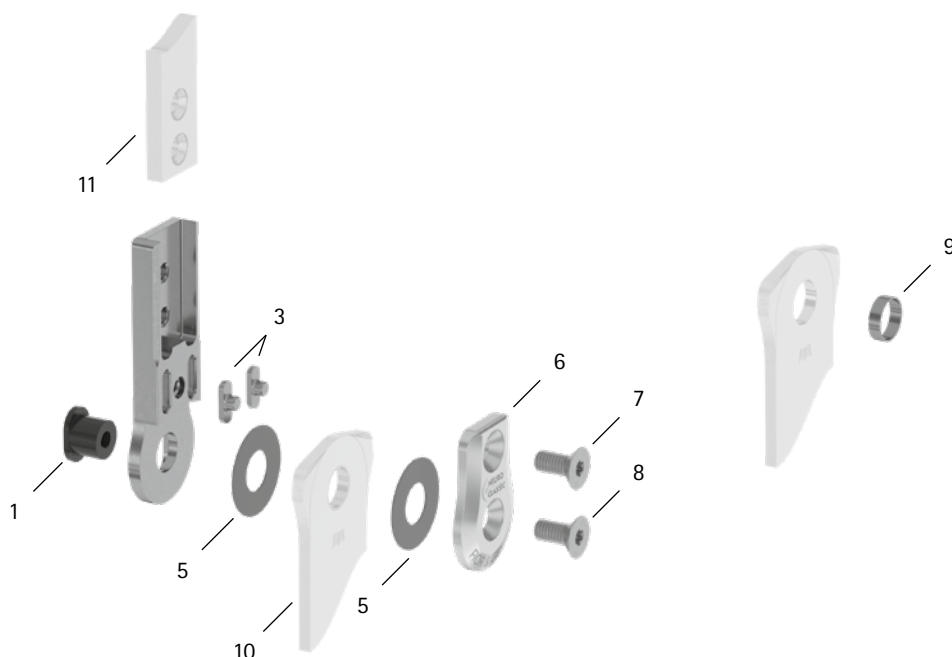

Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB8559-L0580	boulon à goupille fendue, court**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0392-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	GS2009-040	rondelle de friction, Ø = 20 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5	GS2009-045					
5	GS2009-050					
5	GS2009-055					
5	GS2009-060					
6	SF0162-AL	plaque supérieure**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
1, 6-8	SF1972-AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
9	BR1009-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
11	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément