



Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB8559-L0670	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2a	SC9605-L08ST	vis de réglage	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	GS4007	goupille de sécurité	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
4	GS1609-040	rondelle de friction, Ø = 20 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1609-045					
4	GS1609-050					
4	GS1609-055					
4	GS1609-060					
5	SF0262-AL	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
8	BR1009-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancrages modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient