



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB1069-L0810	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2a	SC9606-L10ST	vis de réglage	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	GS4007	goupille de sécurité	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
4	GS2611-040	rondelle de friction, Ø = 26 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SH0265-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SH0265-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite				
6	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1406-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
8	BR1211-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancrages modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient