



Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB8559-L0620	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2a	SC9605-L08ST	vis de réglage	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	GS4007	goupille de sécurité	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
4	GS2009-040	rondelle de friction, Ø = 20 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
6	FE1634-02	ressort de pression, doré**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SF0342-75	boulon**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SF0462-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SF0462-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite**				
10	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
11	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
5-11	SF4972-L/AL	ensemble fonctionnel, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5-11	SF4972-R/AL	ensemble fonctionnel, médiale gauche ou latérale droite***				
<b>Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires</b>						
12	BR1009-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
13	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
14	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

\*\* fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

\*\*\* composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément