



Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB8559-L0580	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2009-040	rondelle de friction, Ø = 20 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2009-045					
3	GS2009-050					
3	GS2009-055					
3	GS2009-060					
5	FE1634-02	ressort de pression, doré	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SF0342-75	boulon	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SF0362-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SF0362-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite				
9	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
10	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
<b>Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires</b>						
11	BR1009-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
12	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
13	voir catalogue	ancrages modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient