



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB9669-L0760	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2a	SC9606-L10ST	vis de réglage	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	GS4007	goupille de sécurité	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
4	GS2210-040	rondelle de friction, Ø = 22 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2210-045					
4	GS2210-050					
4	GS2210-055					
4	GS2210-060					
6	FE2836-02	ressort de pression, doré**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SF0343-72	boulon**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SF0463-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SF0463-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite**				
10	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
11	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
5-11	SF4973-L/AL	ensemble fonctionnel, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5-11	SF4973-R/AL	ensemble fonctionnel, médiale gauche ou latérale droite***				
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
12	BR1110-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
13	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
14	voir catalogue	ancrages modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément