



Pos.	10 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB6039-L0580	boulon à goupille fendue	usure	usure	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0390-01	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS1206-040	rondelle de friction, Ø = 12 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1206-045					
4	GS1206-050					
4	GS1206-055					
4	GS1206-060					
5	SF0760-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SF0760-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite**				
7	FE1622-01	ressort de pression, doré**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8	SF0840-07	boulon**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
10	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
11	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
5-11	SF7970-L/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5-11	SF7970-R/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				
<b>Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires</b>						
12	BP0706-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
13	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
14	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

\*\* fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

\*\*\* composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément