


Commission des patients/ID de configuration _____

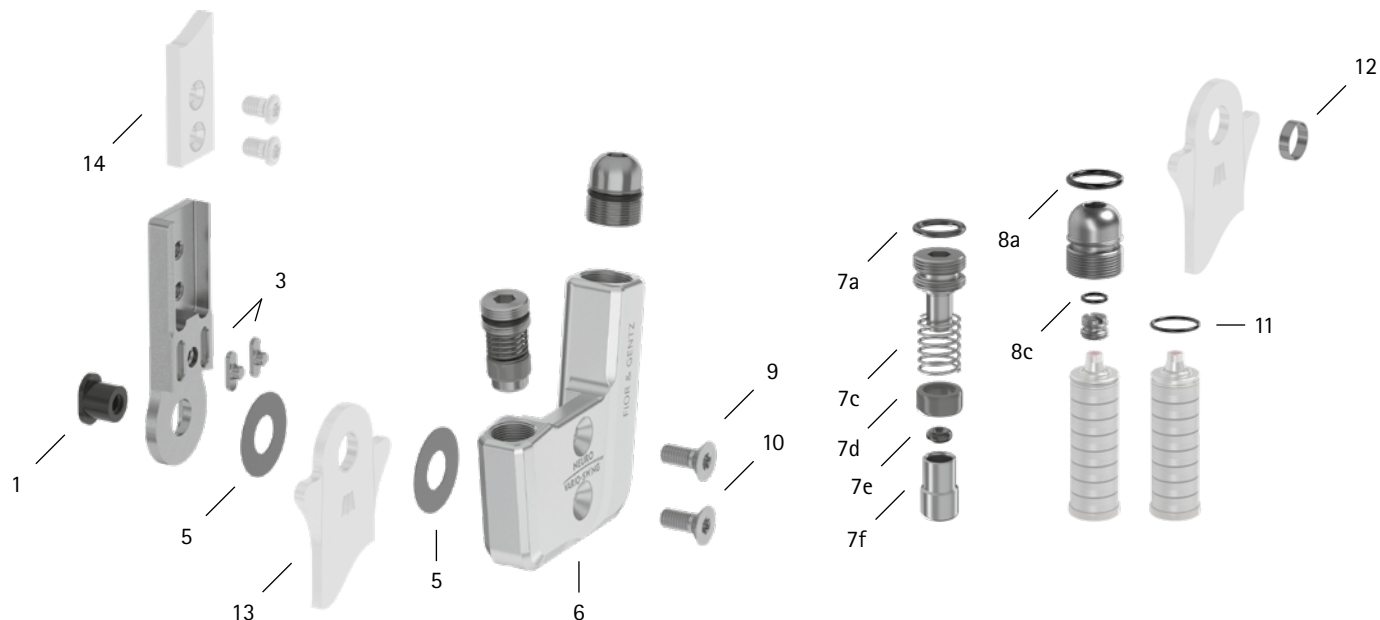

Pos.	10 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB6039-L0580	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0390-01	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	GS1206-040	rondelle de friction, Ø = 12 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5	GS1206-045					
5	GS1206-050					
5	GS1206-055					
5	GS1206-060					
6	SH0460-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SH0460-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite**				
7a	VE3771-04/10	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7c	FE1615-01	ressort de pression**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7d	GS0604-350	douille de guidage**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7e	PN0003-L02	amortisseur de butée**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7f	SH0490-01	piston**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8a	VE3771-06/11	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8c	VE3771-03/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
10	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-10	SH4970-L/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6-10	SH4970-R/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				

Commission des patients/ID de configuration _____

Pos.	10 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Mécanismes de ressort						
11	VE3771-045/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
-	SF5800-15/02	mécanisme de ressort, bleu, normale, liberté de mouvement max. 15°	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
-	SF5800-15/04	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°	glissement des rondelles Belleville	réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince		
-	SF5800-10/06	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°	bruit du mécanisme de ressort	graisser le mécanisme de ressort avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
-	SF5800-10/09	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
-	SF5800-05/17	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
12	BP0706-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
13	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
14	voir catalogue	ancres modulaires et montant modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément