


Commission des patients/ID de configuration _____

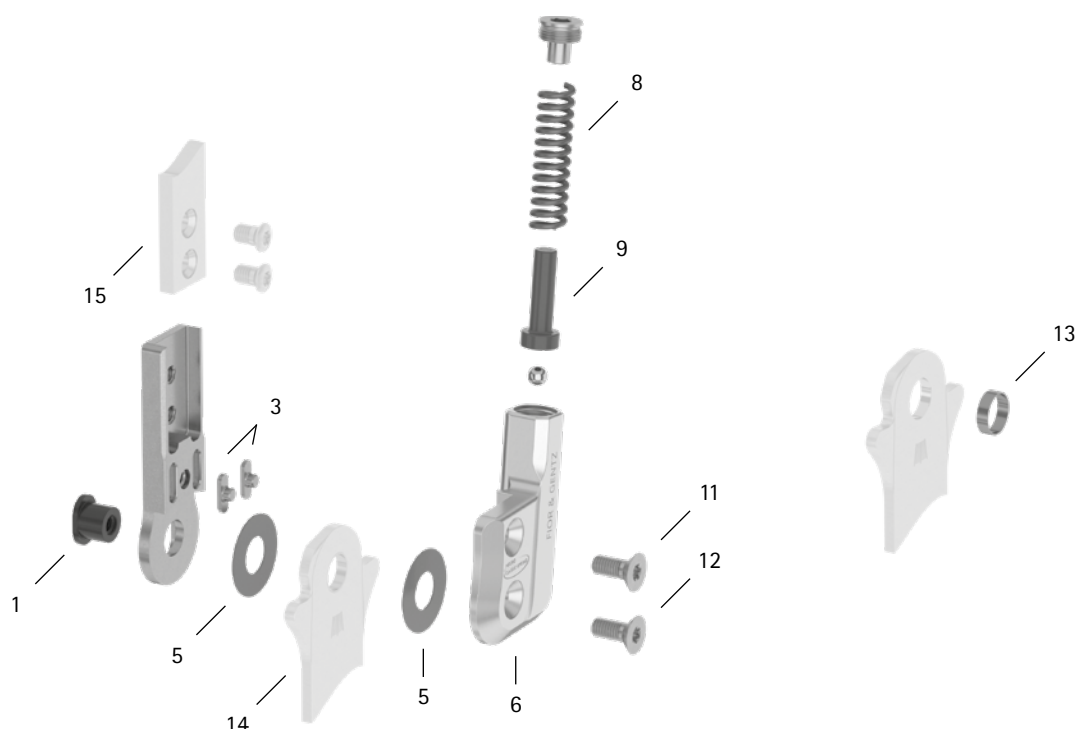

Pos.	12 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB7049-L0590	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0391-01	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	GS1407-040	rondelle de friction, Ø = 14 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5	GS1407-045					
5	GS1407-050					
5	GS1407-055					
5	GS1407-060					
6	SF0761-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SF0761-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite**				
8	FE1734-01	ressort de pression, doré**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	SF0841-07	boulon**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
11	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
12	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-12	SF7971-L/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6-12	SF7971-R/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
13	BR0807-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
14	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
15	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément

WP0030-FR-2023-01