



Pos.	12 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB7049-L0590	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0391-01	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	GS1407-040	rondelle de friction, Ø = 14 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5	GS1407-045					
5	GS1407-050					
5	GS1407-055					
5	GS1407-060					
6	SH0561-AL	plaque supérieure**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SH0491-01	piston**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	PN0004-L02	amortisseur de butée**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	GS0705-525	douille de guidage**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	FE1611-01	ressort de pression**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11a	VE3771-08/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11c	VE3771-04/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
12	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
13	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-13	SH5971-AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois

Commission des patients/ID de configuration _____



Pos.	12 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Mécanismes de ressort						
14	VE3771-06/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5801-15/03	mécanisme de ressort, bleu, normale, liberté de mouvement max. 15°	usure	remplacer		
15	SH5801-15/06	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°	glissement des rondelles Belleville	réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5801-10/12	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°				
15	SH5801-10/19	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
15	SH5801-05/33	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°	bruit du mécanisme de ressort	graisser le mécanisme de ressort avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
16	BR0807-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
17	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
18	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément