


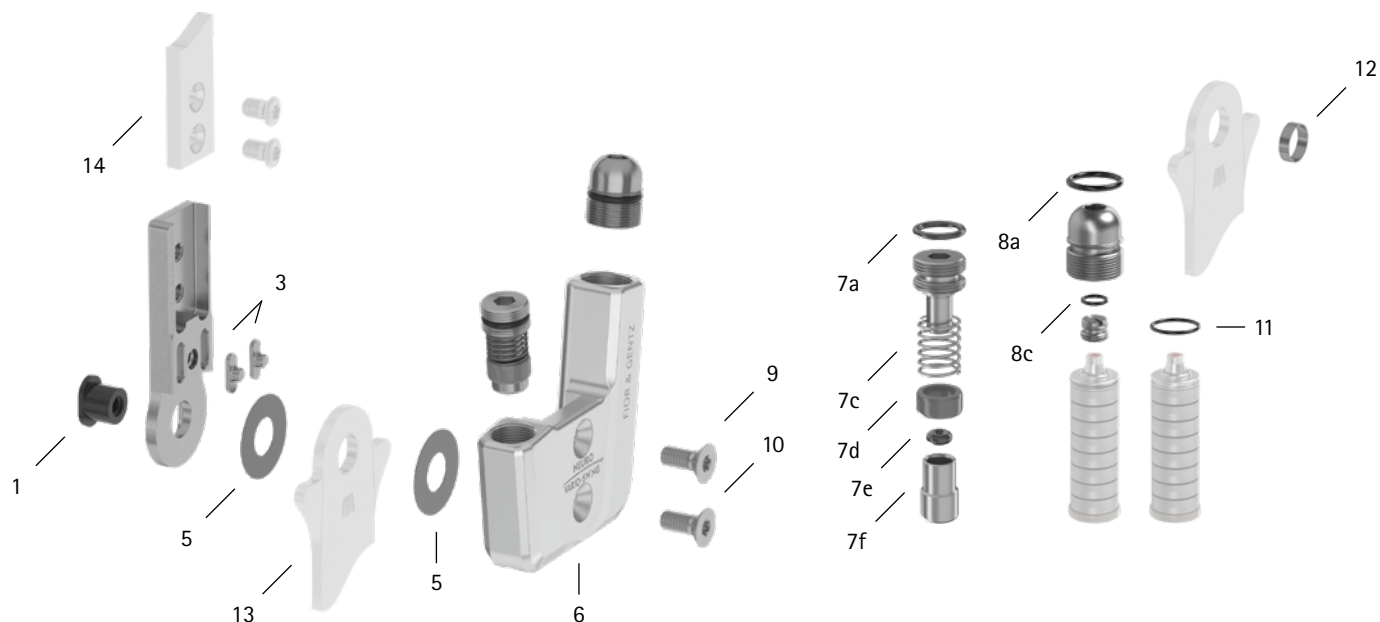

Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB8559-L0630	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0392-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	GS2009-040	rondelle de friction, Ø = 20 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5	GS2009-045					
5	GS2009-050					
5	GS2009-055					
5	GS2009-060					
6	SH0462-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SH0462-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite**				
7a	VE3771-08/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7c	FE1916-01	ressort de pression**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7d	GS1007-350	douille de guidage**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7e	VE3771-010/20	amortisseur à joint torique**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7f	SH0492-01	piston**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8a	VE3771-09/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8c	VE3771-04/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
10	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-10	SH4972-L/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6-10	SH4972-R/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				

Commission des patients/ID de configuration _____



Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Mécanismes de ressort						
11	VE3771-07/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
-	SF5802-15/05	mécanisme de ressort, bleu, normale, liberté de mouvement max. 15°	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
-	SF5802-15/11	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°	glissement des rondelles Belleville	réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince		
-	SF5802-09/16	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°	bruit du mécanisme de ressort	graisser le mécanisme de ressort avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
-	SF5802-10/29	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
-	SF5802-05/53	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
12	BR1009-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
13	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
14	voir catalogue	ancres modulaires et montant modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément