



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB1069-L0960	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0395-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS2611-040	rondelle de friction, Ø = 26 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SF0865-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SF0865-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite**				
6a	VE3771-09/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6c	FE1027-01	ressort de pression**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6d	GS1108-500	douille de guidage**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6e	VE3771-012/26	amortisseur à joint torique**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6f	SH0493-01	piston**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	FE2966-01	ressort de pression, doré**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	SF0845-10	boulon**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
11	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
12	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
5-12	SF8975-L/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5-12	SF8975-R/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
13	BR1211-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
14	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
15	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément