


Commission des patients/ID de configuration _____

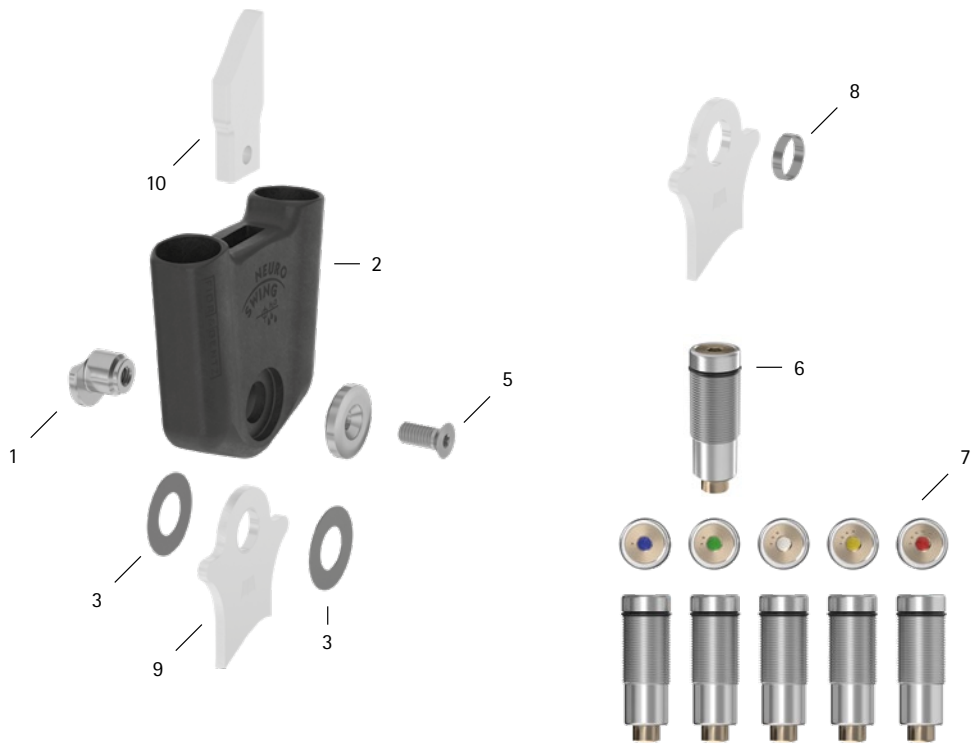

Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SF0592-C/1	boulon à goupille fendue	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
2	SF0502-C	boîtier de l'articulation	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
3	GS1911-040	rondelle de friction, Ø = 19 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS1911-045					
3	GS1911-050					
3	GS1911-055					
3	GS1911-060					
5	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Mécanismes de ressort						
6	VE3771-100/12	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SF5802-C/15/05	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure bruits du mécanisme de ressort	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SF5802-C/15/11	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°				
7	SF5802-C/09/16	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°				
7	SF5802-C/10/29	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
7	SF5802-C/05/53	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
8	BR1211-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
-	-	liaison collée (montant modulaire/ancre modulaire et articulation modulaire)	rupture	coller un composant modulaire en carbone neuf	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient