
Commission des patients/ID de configuration _____



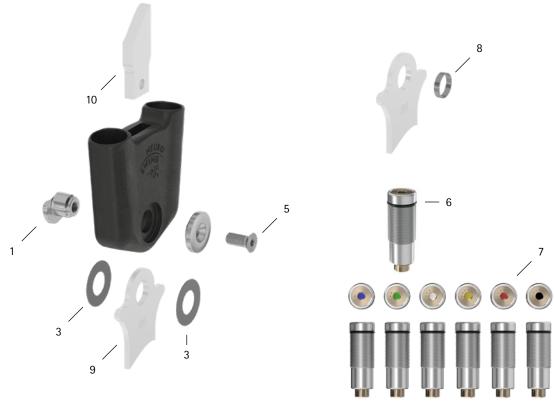

| Pos. | 16 mm | Désignation | Problème possible | Solution | Contrôle recommandé, remplacement potentiel* | Remplacement au plus tard après |
|-------|--------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|
| Artic | ulation modulaire | | | | | |
| 1 | SF0593-C/1 | boulon à goupille fendue | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 3 | GS2413-040 | rondelle de friction, Ø = 24 mm | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 3 | GS2413-045 | | | | | |
| 3 | GS2413-050 | | | | | |
| 3 | GS2413-055 | | | | | |
| 3 | GS2413-060 | | | | | |
| 5 | SC1406-L14 | vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| Méca | anismes de ressort | et butée dorsale statique | | | | |
| 6 | VE3771-12/12 | joint torique pour la fixation du mécanisme de ressort et de la butée dorsale statique | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 7 | SF5803-C/15/07 | mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15° | usure bruits du mécanisme de ressort/de la butée dorsale statique | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 7 | SF5803-C/15/15 | mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15° | | | | |
| 7 | SF5803-C/10/21 | mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10° | | | | |
| 7 | SF5803-C/10/31 | mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10° | | | | |
| 7 | SF5803-C/05/63 | mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5° | | | | |
| 7 | SF5803-C/0 | butée dorsale statique, noire, liberté de mouvement max. 0° | | | | |
| Étrie | rs de pied modulai | ires, ancres modulaires et montants modulaires | | | | |
| 8 | BR1312-L030 | douille de guidage | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 9 | voir catalogue | étrier de pied modulaire | usure ou rupture | remplacer | tous les 6 mois | 48 mois |
| 10 | voir catalogue | ancres modulaires et montants modulaires | usure ou rupture | remplacer | tous les 6 mois | au besoin |
| - | - | liaison collée (montant modulaire/ancre modulaire et articulation modulaire) | rupture | coller un compo- sant modulaire en carbone neuf | tous les 6 mois | au besoin |

^{*} selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient