


Commission des patients/ID de configuration _____

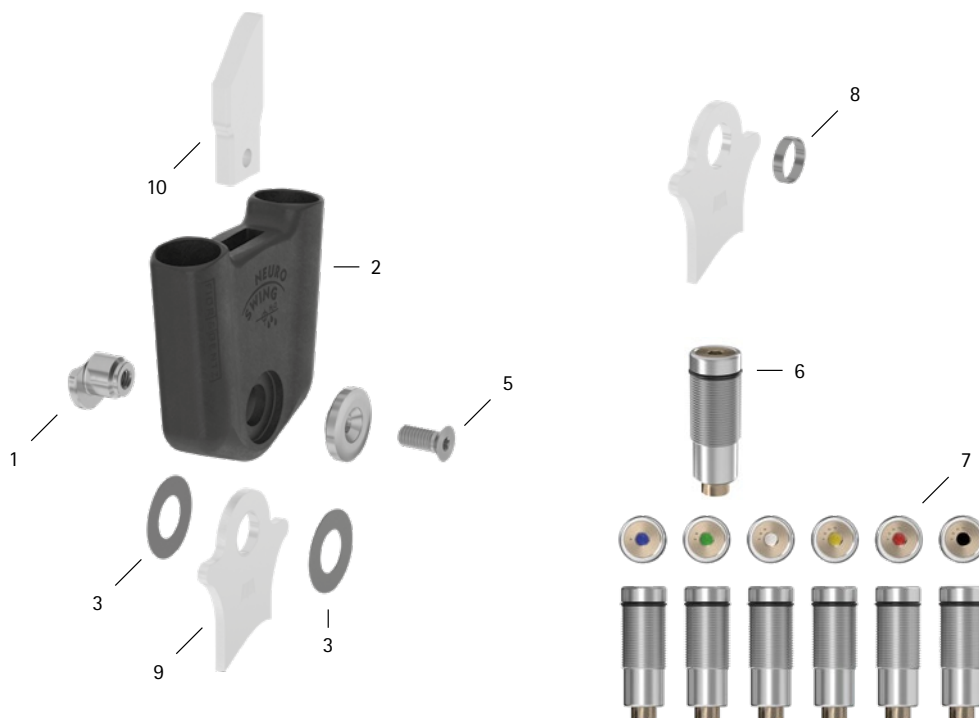

Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SF0595-C/1	boulon à goupille fendue	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
2	SF0505-C	boîtier de l'articulation	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
3	GS2815-040	rondelle de friction, Ø = 28 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2815-045					
3	GS2815-050					
3	GS2815-055					
3	GS2815-060					
5	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Mécanismes de ressort et butée dorsale statique						
6	VE3771-140/15	joint torique pour la fixation du mécanisme de ressort et de la butée dorsale statique	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SF5805-C/15/18	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure bruits du mécanisme de ressort/de la butée dorsale statique	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SF5805-C/15/25	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°				
7	SF5805-C/10/40	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°				
7	SF5805-C/10/60	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
7	SF5805-C/05/99	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
7	SF5805-C/0	butée dorsale statique, noire, liberté de mouvement de 0°				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
8	BR1514-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
-	-	liaison collée (montant modulaire/ancre modulaire et articulation modulaire)	rupture	coller un composant modulaire en carbone neuf	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

WP0068-FR-2025-09