


Commission des patients/ID de configuration _____

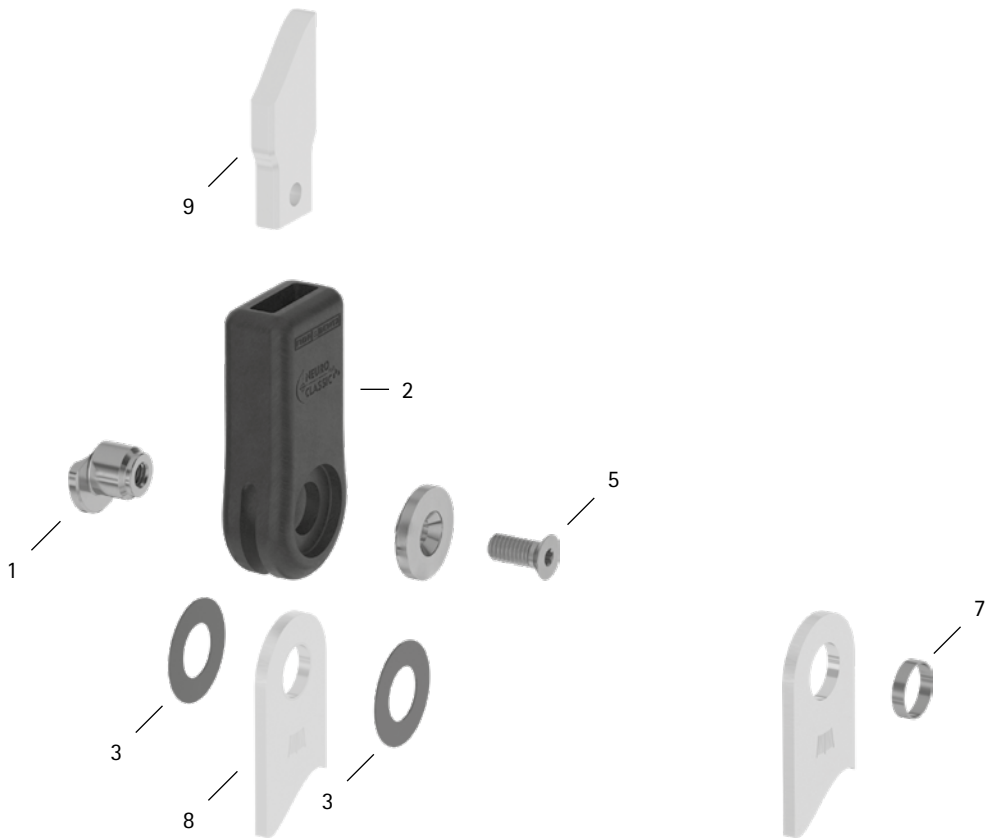

Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SF0593-C/1	boulon à goupille fendue	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
2	SF0103-C	boîtier de l'articulation	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
3	GS2413-040	rondelle de friction, Ø = 24 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2413-045					
3	GS2413-050					
3	GS2413-055					
3	GS2413-060					
5	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
7	BR1312-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8	see catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
9	see catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
-	-	liaison collée (montant modulaire/ancre modulaire et articulation modulaire)	rupture	coller un composant modulaire en carbone neuf	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient