

Commission des patients/ID de configuration _____



Pos.	24 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Mécanismes de ressort						
14	VE3771-140/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5807-15/12	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure	remplacer		
15	SH5807-15/25	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°	glissement des rondelles Belleville	réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince		
15	SH5807-10/53	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°	bruit du mécanisme de ressort	graisser le mécanisme de ressort avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5807-10/80	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
15	SH5807-05/99	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
16	BR1413-L070	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
17	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
18	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** les composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément