


Commission des patients/ID de configuration _____

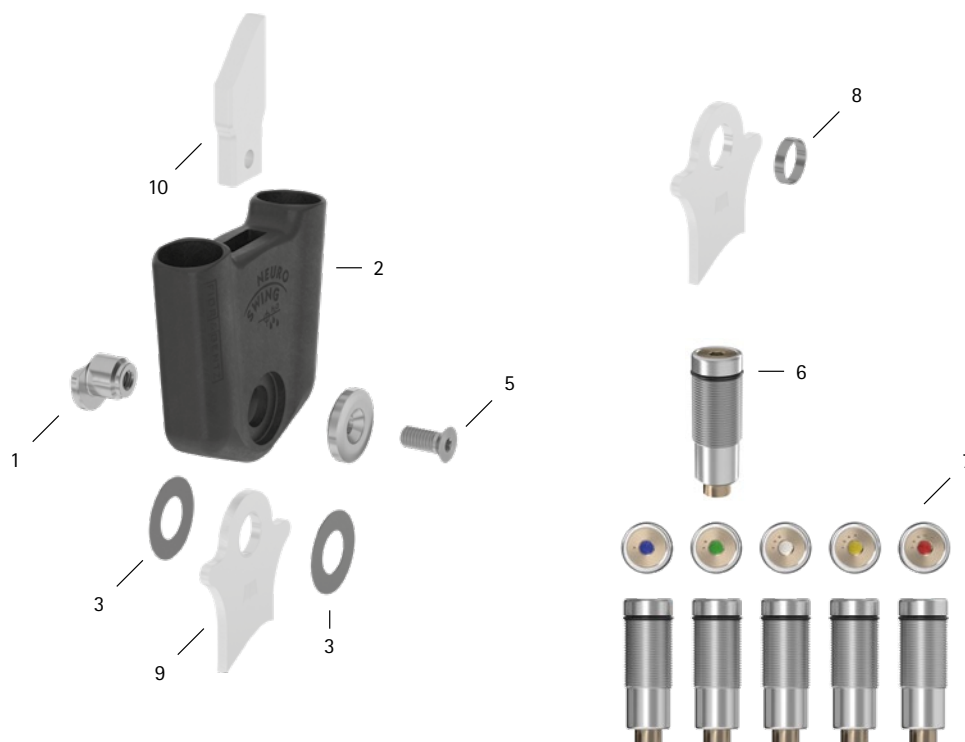

Pos.	10 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SF0590-C/1	boulon à goupille fendue	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
2	SF0500-C	boîtier de l'articulation	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
3	GS1207-040	rondelle de friction, Ø = 12 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS1207-045					
3	GS1207-050					
3	GS1207-055					
3	GS1207-060					
5	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Mécanismes de ressort						
6	VE3771-070/12	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SF5800-C/15/02	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure bruits du mécanisme de ressort	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SF5800-C/15/04	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°				
7	SF5800-C/10/06	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°				
7	SF5800-C/10/09	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
7	SF5800-C/05/17	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
8	BR0807-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
-	-	liaison collée (montant modulaire/ancre modulaire et articulation modulaire)	rupture	coller un compo- sant modulaire en carbone neuf	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

WP0132-FR-2026-05